


Technisches Datenblatt

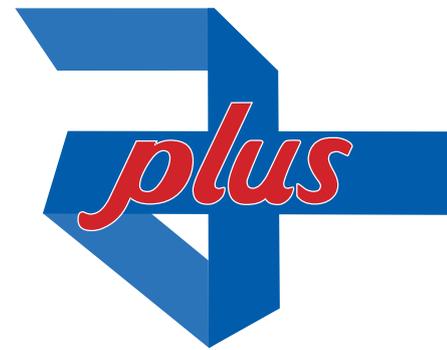

MaiMed[®] MyClean DS Flowpack Desinfektionstücher mit Alkohol

Gebrauchsfertige, alkoholische, aldehyd- und QAV-freie Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und Oberflächen im medizinischen Umfeld, Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie
Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten
Für den professionellen Gebrauch

- Tränklösung wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid PLUS
- Aldehyd- und QAV-frei (auch im Lebensmittelbereich)
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet



Anwendung: Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Ausführung:

MaiMed[®] MyClean DS Flowpack

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	20 x 20 cm	80 Blatt	79760	4046153134564	16913228	12

Einwirkzeiten:

Einwirkzeiten für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid (EN 13624, EN 13727 und EN 16615; niedrige Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (EN 14348; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; niedrige Belastung):	1 Minute
Einwirkzeiten für den Lebensmittelbereich	
Bakterizid, levurozid ohne Mechanik (EN 1276, EN 1650; niedrige Belastung):	5 Minuten
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (niedrige Belastung):	1 Minute

Zusammensetzung: In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoff: 50 g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, Biozidverordnung
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Verwendbarkeit: 2 Jahre; nach Anbruch innerhalb von 28 Tagen verbrauchen; nur feuchte Tücher verwenden

Biozidnummer: N-96533

Symbole:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed[®] MyClean-DS-Flowpack-202204