

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MyClean® FD Flächendesinfektion

- Schnell und umfassend bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend, inkl. HBV/HIV, BVDV (HCV) sowie Vaccinia-Viren, gemäß aktueller RKI-Empfehlung
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- MRSA wirksam und getestet
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr wirtschaftlich aufgrund niedriger Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen

**Anwendung:** Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, auch für empfindliche Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Pflegewannen etc. geeignet.

**Ausführungen:** MyClean® FD – Flächendesinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	1 Liter / 1 litres	79630	4046153116539	10305999	14
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79631	4046153116553	10306007	2
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	10 Liter / 10 litres	79632	4046153116577	10306013	1

**Wirksamkeit:**

Bakterizid, fungizid gemäß den Standardmethoden der DGHM/VAH:	1,50 % - 15 Minuten 1,00 % - 30 Minuten 0,5 % - 1 Stunde 0,25 % - 4 Stunden
Schnelldesinfektion	8,00 % - 1 Minute
Tuberkulozid (M.-terrae) gemäß EN 14348 (geringe Belastung)	1,50 % - 1 Stunde
Begrenzt viruzid	0,25 % - 15 Minuten
BVDV (HCV Surrogat Virus)	0,25 % - 15 Minuten
Vaccinia-Viren	0,25 % - 15 Minuten 1,00 % - 30 Minuten mit Belastung
SV40-Viren	1,00 % - 1 Stunde
Rota-Viren	1,50 % - 15 Minuten
Noro-Viren (FCV)	2,00 % - 2 Stunden ohne Belastung

**Zusammensetzung:** In 100 g sind enthalten:  
2,5 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid,  
8,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa


**Verwendbarkeit:** 3 Jahre

**Standzeit:** nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

**Symbole:**



Achtung

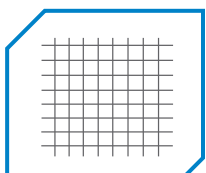

MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany