



Flow Wipes Fresh

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

VAH gelistet

Desinfektionstücher

- Universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- Umfassende, schnelle Wirksamkeit
- Besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in patientennahen Bereichen

Produktbeschreibung

Flow Wipes Fresh sind alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar und Flächen aller Art in patientennahen Bereichen.

Flow Wipes Fresh bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Flow Wipes Fresh basieren auf einer optimal abgestimmten Kombination von Tuchmaterial und Tränkflüssigkeit. Dadurch ist eine wirksame Desinfektion innerhalb kürzester Zeit möglich, wobei auch empfindliche Flächen und Materialien schonend behandelt werden und keine Streifen und Rückstände verbleiben.

Anwendungsgebiete

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG):

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht invasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte- Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung.

gemeldetes Biozid: BAuA Reg.-Nr. N-81495
Biozidprodukte sicher verwenden!

Anwendung

Vor jeder Desinfektion Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Mundschutz tragen.

Flächen mit Flow Wipes Fresh bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamten Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Anwendungshinweis

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
45 g Ethanol

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns über unsere Email: info@pliwa.de, oder telefonisch unter D- 05661-7317-0 erreichen.

Hinweis

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

L.C. PLIWA hat eine Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 sowie ein GMP- und EN 13485 Zertifikat.



L. C. PLIWA

Ljubomir Cugurovic e. Kfm.

Pliwa- Strasse 2

34323 Malsfeld- Ostheim

www.pliwa.de

Tel. 05661/ 73 17 0

Fax 05661/ 73 17 10

info@pliwa.de



Wirkpektrum und Einwirkzeiten

Bakterien und Hefen

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid*

VAH**/ EN 16615

mit Mechanik hohe Belastung 2 Minuten

Bakterizid
EN 13727 hohe und niedrige Belastung 1 Minute

Levurozid (C. albicans)
EN 13624 hohe und niedrige Belastung 1 Minute

Tuberkulozid (M. terrae)
EN 14348 niedrige Belastung 30 Sekunden

Mycobakterizid (M. avium)
EN 14348 niedrige Belastung 1 Minute

Viren

Begrenzt Viruzid PLUS
EN 14476 niedrige Belastung 3 Minuten

Begrenzt Viruzid
EN 14476 niedrige Belastung 30 Sekunden
RKI/DVV inkl. HBV/HIV/HCV 30 Sekunden

Rotaviren
EN 14476 niedrige Belastung 30 Sekunden

Noroviren (MNV)
EN 14476 niedrige Belastung 1 Minute
EN 14476 hohe Belastung 30 Sekunden

Adenoviren
EN 14476 niedrige Belastung 3 Minuten

* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitativen Suspensionsveruche und praxisnahe Keimträgerversuche)

**gelistet in der 5 Min.- Spate der VAH- Liste

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung. UN 3175 + GHS02 Flamme

Liefereinheiten und Dosierhilfen

Einzelpackung	VE	REF
100 Blatt	14 x 100 Blatt/ Nfb. (Karton)	93-2022P
Tuchgröße	100 Blatt (20 x 22 cm)	

Stand: 2019-08-13



L. C. PLIWA
Ljubomir Cugurovic e. Kfm.

Pliwa- Strasse 2
34323 Malsfeld- Ostheim
www.pliwa.de

Tel. 05661/ 73 17 0
Fax 05661/ 73 17 10
info@pliwa.de